

# Anleitung

## Allgemeine Informationen zu Einweg-Gesichtsmasken

Einweg-Gesichtsmasken sollten nur einmal verwendet und dann weggeworfen werden. Entfernen und wechseln Sie auch eine Maske, wenn sie feucht geworden ist.

Befolgen Sie immer die Produktanweisungen zum Verwenden und Aufbewahren von Masken sowie die Verfahren zum Anbringen und Entfernen einer Maske.

## Wie man eine Maske auf das Gesicht legt.

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder Desinfektionsmittel, bevor Sie die Maske berühren.
2. Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und prüfen Sie, ob die Maske keine Markierungen oder Löcher aufweist.
3. Schauen Sie genau hin, auf welcher Seite sich die Oberseite befindet. Die Seite mit der biegbaren Halterung (A) ist die Oberseite und soll die Maske um die Form Ihrer Nase biegen.
4. Schauen Sie genau hin, auf welcher Seite sich die Vorderseite befindet. Die blau gefärbte Seite ist die Vorderseite (B) und diese Seite zeigt nach außen. Die weiße Seite zeigt zu deinem Gesicht.
5. Halten Sie die Maske an den Ohrgummibändern (C). Legen Sie ein Gummiband an jedes Ohr.
6. Drücken oder formen Sie das biegsame Nasenstück so, dass die Maske genau um Ihre Nase sitzt.
7. Ziehen Sie vorsichtig an der Unterseite der Maske, sodass die Maske auch Mund und Kinn bedeckt.

## So entfernen Sie eine Maske von Ihrem Gesicht

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder Desinfektionsmittel, bevor Sie die Maske berühren. Berühren Sie nicht die Vorderseite der Maske, da diese möglicherweise kontaminiert ist. Berühren Sie einfach die Ohrgummis.
2. Halten Sie beide Ohrgummibänder fest, heben Sie die Maske vorsichtig an und entfernen Sie sie.
3. Entsorgen Sie die Maske mit dem Papierkorb. Waschen Sie Ihre Hände erneut mit Wasser und Seife oder mit Desinfektionsmittel.

